

ROCK[®] SAFETY

Our Mission: Your Protection.

ROCK SAFETY Kft. | 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

TÁJÉKOZTATÓ

a 1016 cikkszámú nitril púdermentes vizsgálókesztyű rendeltetésszerű használatához

Gyártó: Maxter Glove Manufacturing Sdn Bhd

Cím: Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan, 6th Miles Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

A védőeszköz megnevezése:

Ötujjas védőkesztyű mechanikai kockázatok ellen

Cikkszám: 116

EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma: 2777/12716-02/E00-00

A megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet:

SATRA Technology Europe Ltd. (2777) Bracetown Business Park. Clonee, D15YN2P. Republic of Ireland

EU-megfelelőségi nyilatkozat – azonosító: 1016-4

– elérhetőség: www.rocksafty.com

SPECIFIKÁCIÓ

Méret	XS	S	M	L	XL
Szélesség tolerancia (mm)	70-79	80-89	90-99	100-109	110 - 119
Teljes hossz (mm)	min. 240	min. 240	min. 240	min. 240	min. 240

KIALAKÍTÁS ÉS FUNKCIÓ

A púdermentes nitril vizsgálókesztyű szintetikus gumiból készült, kétkezes és nem steril. Klórral van kezelve, ami megkönnyíti a kesztyű felvételét, valamint megakadályozza, hogy a kesztyű felülete egymáshoz tapadjon.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A púdermentes nitril vizsgálati kesztyű egy olyan orvosi eszköz, amely védi a használó kezét vagy kézrészét. A kesztyűviselés fő funkciója, hogy megvédje viselőjét a fertőző anyagok, különösen a vírusok, baktériumok, fertőzött vér és testnedvek szennyeződésétől. Csak egyszeri használatra készült.

A púdermentes nitril vizsgálati kesztyűt általában orvosi vizsgálatra, fogászatra, klinikai vizsgálatra, diagnosztikai és terápiás eljárásokra, valamint laboratóriumi célokra használják.

HASZNÁLATI MÓD

1. Felhasználás előtti előkészületek

- Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott kesztyű megfelelő méretű.

2. Használat

- Szárítsa meg kezét felvétel előtt.
- A kesztyű kivétele előtt és használat előtt ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét.
- A kesztyűt óvatosan kell felvenni, ne fejtse ki túl nagy erőt. Ne érintsen meg vele éles, hegyes tárgyat.
- Vágja rövidere körmeit és gyakran cserélje a kesztyűt a szakadás elkerülése érdekében.

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS

1. A termék egyszeri használatra szánt.
2. A kesztyűt használat után megfelelő hulladékgyűjtő edénybe kell dobni a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően.

ÉRVÉNYESSÉG


A kesztyű eltarthatósága a gyártástól számított 5 év.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

1. A környezetnek a kesztyű tárolására alkalmasnak kell lennie.
2. A kesztyűt felbontás előtt és után sötét, hűvös és száraz helyen kell tárolni.
3. A kesztyűt túlzott hőhatástól távol kell tartani. A tárolási hőmérsékletet 40°C /104°F alatt kell tartani.
4. A kesztyűt jól szellőző helyen kell tárolni.
5. A kesztyűt óvni kell a közvetlen napfénytől és fluoresszkáló fénytől.
6. A kesztyűt minden energiát sugárzó és hőtermelő berendezéstől távol kell tárolni.

JELÖLÉSEK

Vegyszeres vizsgálati jel:

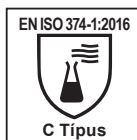

Mikrobiológiai vizsgálati jel:



Információs piktogram:



CE-jelölés:

