

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS GYÁRTÓI TÁJÉKOZTATÓ

PM06B

Háromrétegű egyszerhasználatos
egészségügyi maszk fülpánttal

Leírás:

A fülpántos egészségügyi maszk gyártása és csomagolása tisztatéri környezetben történik. Gyártás: ISO-minősített gyárban saját laboratóriummal.

Felhasználás orvosi- vagy gyógyszeriparban, élelmiszeripar, laboratóriumok, stb.

Tulajdonságok:

Magas szűrőképességű, 3 rétegű alapanyag
Belső és külső folyadékálló, légáteresztő, nem szőtt rétegek

Extra hajlékony orr-csíptető biztosítja az illeszkedést és csökkenti a szemüvegen a páráképződést. Nincs viszkető érzés az orron és az arcon. Nagy szűrőkapacitású, latex-mentes, üvegszál-mentes. Alacsony légzési ellenállás, hipoallergén.

Specifikáció:

Alapanyag: nem-szőtt alapanyag

Orrcsíptető: 100% újrahasznosított fém

Baktérium szűrési hatékonyság: 99%

Bőrirritáció: majdnem nulla

Súly: 3g

Méret: 175mm×95mm (hossz x szélesség)

Szín: Fehér/Kék

Csomagolás:

Csomag méret: kb. (19×10×8) cm (HxSZxM)

Csomag súlya: kb. 300g

Csomagolási egységek: 5db/zacskó,

50db/csomag, doboz vagy tasak,

2500db/karton

Karton: 6 kg/karton, 510×385×317mm

Felhasználás:

A maszkot minimum 4 óránként cserélni kell.

Ez a maszk csak egyszer használható (nem tisztítható). Kizárólag felhasználás előtt

szedjük ki csomagjából a maszkot. Csak akkor

használható, ha nem szennyeződött.

Felhasználás előtt mindig ellenőrizzük azt,

hogy ép és tiszta legyen. Használat után

gondoskodjunk a megfelelő tárolásról és

megsemmisítésről.



HOGYAN VISELJE A MASZKOT



1



2



3

1. Tartsa a maszkot kezében, az orrcsíptetővel felfelé!
Helyezze a maszkot az álla alá, fedje le a száját és az orrt!

2. Fogja meg az egyik fülpántot és helyezze az azonos oldali
fül mögé, ezt követően fogja meg a másik oldali fülpántot és
helyezze a másik fül mögé!

3. Nyomja le az orrcsíptetőt az orrnyeregbe
a tökéletes illeszkedés érdekében!
Ellenőrizze, hogy helyesen került az arcra a maszk!

ROCK SAFETY®
Our Mission: Your Protection.

ROCK SAFETY Kft. | 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

Tel.: +36 57 515 700, +36 30 652 42 69 | Fax: +36 57 515 701 | Adószám: 11502159-2-16

www.rocksfafety.com | webshop@rocksfafety.com

